

Anweisungen

Lesen Sie zuerst die komplette Beschreibung bevor Sie anfangen.
Sie brauchen einen Spiegel und eine Uhr mit Sekundenzeiger.
Nicht anzuwenden bei Zahnspangenträgern (Braces).
Nicht anzuwenden bei Personen mit Überempfindlichkeit gegen A-Silikonmasse (ISO 4823).

Schritt 1

Nehmen Sie mit sauberen Händen das Abformmaterial aus der Schachtel.
Abformmaterial schnell innerhalb von 30 Sekunden mit den Fingerspitzen durchkneten bis Sie eine gleichmäßige Farbe erhalten.

Achtung: Das Abformmaterial härtet in nur 3 Minuten



Schritt 2

Verteilen Sie es schnell im Abdrucklöffel so, dass bei den Vorderzähnen mehr Abformmaterial vorhanden ist. Drücken Sie das Abformmaterial fest in den Löffel.

Achtung: Nutzen sie das gesamte Abformmaterial



Schritt 3

Halten Sie den Löffel vor dem Spiegel in Ihren Mund. Stecken Sie Ihre Zähne in die Mitte des Abformmaterials, ein halben Zentimeter entfernt von der Vorderseite des Löffels.

Drücken Sie den Löffel **so fest wie möglich** nach oben, die Daumen drücken dabei gegen Ihre Eckzähne, Lippen müssen vorne über die Form passen, also nicht eingeklemmt sein.

Drücken Sie mit Ihren Fingern gegen den flachen Bereich unter die Nase zum Zahnfleisch hin.

Lassen Sie den Löffel 3 MINUTEN in Ihrem Mund aushärten.



Schritt 4

Nehmen Sie den Löffel aus Ihrem Mund, indem Sie den Handgriff hin und her bewegen. Langsam kommt er locker heraus, Ihr Abzug ist fertig.

Achtung: Das Abformmaterial soll in dem Löffel sitzen bleiben.



Schritt 5

Füllen Sie in Blockschrift das Formular aus.

Legen Sie das Formular und den Abdruck in den Briefumschlag.

Schritt 6

Schicken Sie den Briefumschlag direkt zu Guardkit, um Austrocknung zu vermeiden. Ihren individuell hergestellten Zahnschutz bekommen Sie innerhalb von zweieinhalb Wochen per Post zugesandt.



Anweisungen

Abformmaterial

Abdrucklöffel

Formular

Rücksende Umschlag